

Dispositivos de toma de muestra

Aplicaciones e instrucciones básicas

Portafolio Ginecológico-Obstétrico (*Femenino*)


Prueba	Viales y Medio	Instrucción
Papanicolaou Convencional	 Cepillo endocervical Espátula Portaplaque y placa	• Se incluye el cepillo o espátula cervical de toma de muestra. • Se debe tomar la mayor cantidad de muestra a nivel del cuello uterino. • Se coloca la placa dentro del porta placa y se cierra correctamente.
Citología Cérvico Uterina en Base Líquida	 Vial grande Cepillo cervical (citobrush)	• Con el cepillo citobrush se toma la muestra a nivel del cuello uterino. • Dar de 10 a 12 vueltas para asegurar una buena muestra.
• Screening + Genotipificación de HPV (29 o 40 genotipos) • Panel de Detección de 12 ITS • GinePlus PCR • Flora Scan Vaginal	 Vial grande Cepillo cervical (citobrush)	• El cepillo debe ingresar en el medio y se debe asegurar que la muestra tomada se mezcle con el solución conservadora de células. • La parte blanca del cepillo se queda en el vial. • La parte azul del cepillo citobrush se desecha. • Cerrar correctamente el vial y se envía al laboratorio a procesar. <i>*Toda prueba PCR femenina en el portafolio se toma de la misma forma.</i>

Cultivo de Secreción Vaginal	 Medio Stuart	• El medio incluye el hisopo de toma de muestra. • Se debe tomar la mayor cantidad de secreción. • Se cierra correctamente el medio y se envía al laboratorio a procesar.
• Paneles de detección de Agentes infecciosos asociados a lesiones • Panel de detección de patógenos asociados con infecciones genitales	 Vial grande Cepillo cervical (citobrush)	• Con el cepillo citobrush se toma la muestra a nivel del cuello uterino. • Dar de 10 a 12 vueltas para asegurar una buena muestra. • El cepillo debe ingresar en el medio y se debe asegurar que la muestra tomada se mezcle con el solución conservadora de células. • La parte blanca del cepillo se queda en el vial. • La parte azul del cepillo citobrush se desecha. • Cerrar correctamente el vial y se envía al laboratorio a procesar.
• Panel de detección e identificación de Candida species pluralis (spp.)	 Vial grande Cepillo cervical (citobrush)	• Con el cepillo citobrush se toma la muestra a nivel del cuello uterino. • Dar de 10 a 12 vueltas para asegurar una buena muestra. • El cepillo debe ingresar en el medio y se debe asegurar que la muestra tomada se mezcle con el solución conservadora de células. • La parte blanca del cepillo se queda en el vial. • La parte azul del cepillo citobrush se desecha. • Cerrar correctamente el vial y se envía al laboratorio a procesar.
• Paneles de detección de agentes asociados con infección de vías urinarias	 Frasco estéril de muestra urinaria	• Orina de primera mañana colectada en frasco estéril.

Combos (Femenino)

Prueba	Viales y Medio	Instrucción
• CO-TEST (29 genotipos) • CO-TEST (40 genotipos) • VPH (29 genotipos) + 12 ITS • VPH (29 genotipos) + 12 ITS + Citología • VPH (29 genotipos) + GinePlus PCR • VPH (29 genotipos) + Flora Scan PCR • 12 ITS + Flora Scan + GinePlus PCR	 Vial grande Cepillo cervical (citobrush)	• Con el cepillo citobrush se toma la muestra a nivel del cuello uterino. • Dar de 10 a 12 vueltas para asegurar una buena muestra. • El cepillo debe ingresar en el medio y se debe asegurar que la muestra tomada se mezcle con el solución conservadora de células. • La parte blanca del cepillo se queda en el vial. • La parte azul del cepillo citobrush se desecha. • Cerrar correctamente el vial y se envía al laboratorio a procesar. <i>*Toda prueba PCR femenina en el portafolio se toma de la misma forma.</i>

Portafolio Ginecológico-Obstétrico (Masculino)

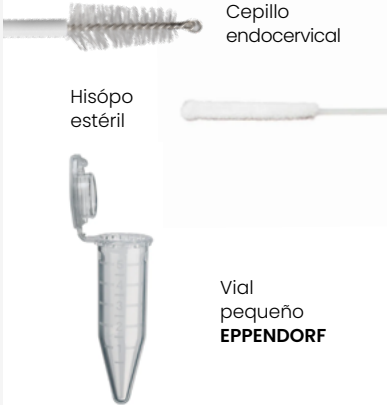Prueba	Viales y Medio	Instrucción
• Screening + Genotipificación de HPV (29 o 40 genotipos) • Panel de Detección de 12 ITS	 Cepillo endocervical Hisopo estéril Vial pequeño EPPENDORF	• El hisopo estéril (no debe ser de madera) se introduce en la uretra, se da de 10 a 12 vueltas. • Se coloca en el vial, se corta y el restante se desecha. • El cepillo endocervical realiza un cepillado externo (cabeza del pene y precucio). • Se coloca en el vial, la escobilla se corta y el restante se desecha.
• Paneles de detección de Agentes infecciosos asociados a lesiones • Panel de detección de patógenos asociados con infecciones genitales	 Cepillo endocervical Hisopo estéril Vial pequeño EPPENDORF	• El hisopo estéril (no debe ser de madera) se introduce en la uretra, se da de 10 a 12 vueltas. • Se coloca en el vial, se corta y el restante se desecha. • El cepillo endocervical realiza un cepillado externo (cabeza del pene y precucio). • Se coloca en el vial, la escobilla se corta y el restante se desecha.

Prueba	Viales y Medio	Instrucción
Panel de detección e identificación de <i>Candida species pluralis</i> (spp.)	 Cepillo endocervical Hisópo estéril Vial pequeño EPPENDORF	- El hisópo estéril (no debe ser de madera) se introduce en la uretra, se da de 10 a 12 vueltas. - Se coloca en el vial, se corta y el restante se desecha. - El cepillo endocervical realiza un cepillado externo (cabeza del pene y precucio). - Se coloca en el vial, la escobilla se corta y el restante se desecha.

Combos (*Masculino*)


Prueba	Viales y Medio	Instrucción
- CO-TEST (29 genotipos) - CO-TEST (40 genotipos) - VPH (29 genotipos) + 12 ITS - VPH (29 genotipos) + 12 ITS + Citología	 Cepillo endocervical Hisópo estéril Vial pequeño EPPENDORF	- El hisópo estéril (no debe ser de madera) se introduce en la uretra, se da de 10 a 12 vueltas. - Se coloca en el vial, se corta y el restante se desecha. - El cepillo endocervical realiza un cepillado externo (cabeza del pene y precucio). - Se coloca en el vial, la escobilla se corta y el restante se desecha.

Portafolio Patológico

Prueba	Viales y Medio	Instrucción
Biopsias		- Colocar la biopsia en un recipiente estéril con tapa hermética y FORMOL al 10% que cubra en su totalidad la muestra. - Enviar datos y antecedentes del paciente con detalles o informe de la zona de toma de muestra según lo solicitado en nuestra guía de remisión para biopsias.

Pruebas de Enfermedades Respiratorias

Pruebas	Viales y Medio	Instrucción
• NeumoPlus PCR • Detección de SARS COV - 2. • Viro Scan • BactoVir Scan	 Hisopo estéril Vial pequeño EPPENDORF	• Introducir el hisopo por la fosa nasal. • Dirigirlo paralelo al paladar, no hacia arriba (tabique). • Avanzar suavemente hasta llegar a la pared posterior de la nasofaringeo. • Girar el hisopo 3 a 5 veces y retirarlo lentamente. • Colocarlo en el vial, cortar la escobilla y desechar. • Tapar correctamente el vial y enviar al laboratorio.
• Aedes Scan		• Se toma una muestra de sangre en tubo lila con EDTA. • Invertir de arriba hacia abajo los tubos lilas con la muestra por 3 min, suavemente para garantizar la mezcla de la sangre con el anticoagulante. • Rotular el tubo con los datos del paciente. • Mantener la muestra en cadena de frío. • Enviar en la brevedad posible al laboratorio para su análisis.

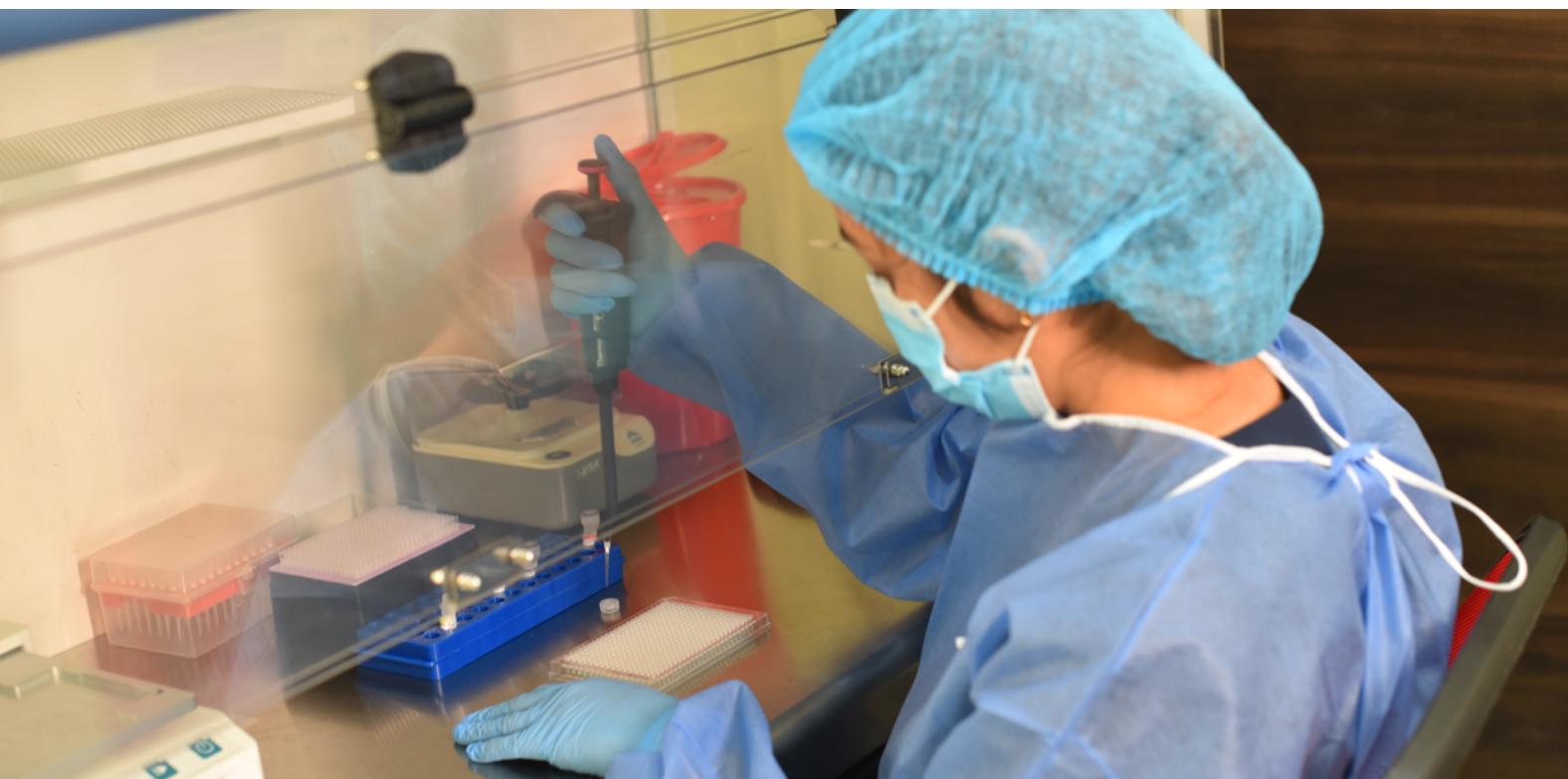

Prueba Informativa de ADN de paternidad

Prueba	Viales y Medio	Instrucción
Análisis informativo de ADN de paternidad		• Se toma una muestra de sangre en tubo lila con EDTA al presunto padre y al filial en sospecha, un tubo por cada parte implicada. • Invertir de arriba hacia abajo los tubos lilas con la muestra por 3 min, suavemente para garantizar la mezcla de la sangre con el anticoagulante. • Mantener la muestra en cadena de frío hasta máximo por 72h (Incluyendo el tiempo de entrega al laboratorio). • Rotular los tubos con los datos de los pacientes. • Consentimiento de toma de muestra firmado. • Adjuntar copia de cédulas de las partes implicadas o en su respecto el certificado de nacimiento del menor.

